




# Guide de démarrage rapide



EOLife Connect est disponible iOS et Android.  
Restez connectés pour être informés des futures mises à jour de l'application

# ÉCRAN D'ACCUEIL

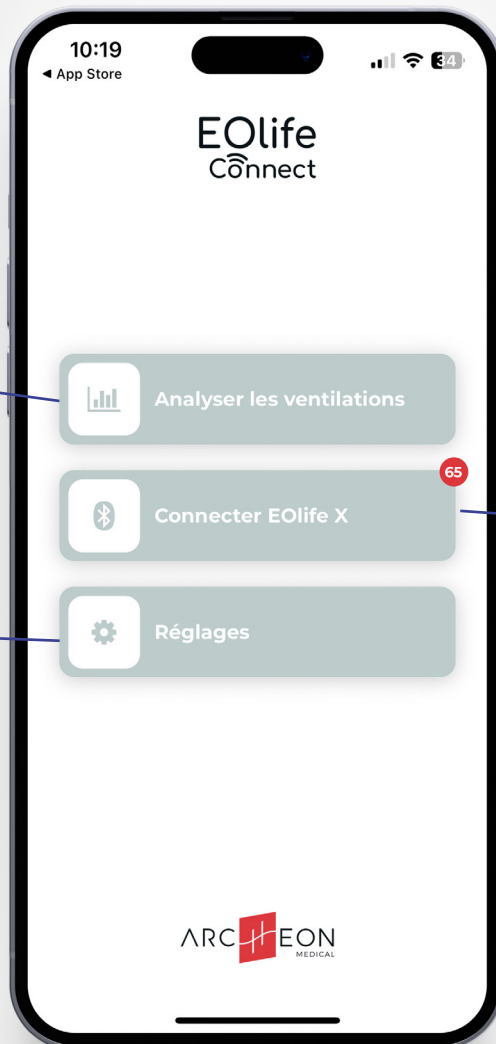

**B**

Analyse les sessions de ventilations téléchargées (page 8)

**C**


Paramètres (page 14)

**A**

Télécharger les sessions depuis un EOLife X (page 4)

A

# 01. TÉLÉCHARGEMENT DE SESSIONS

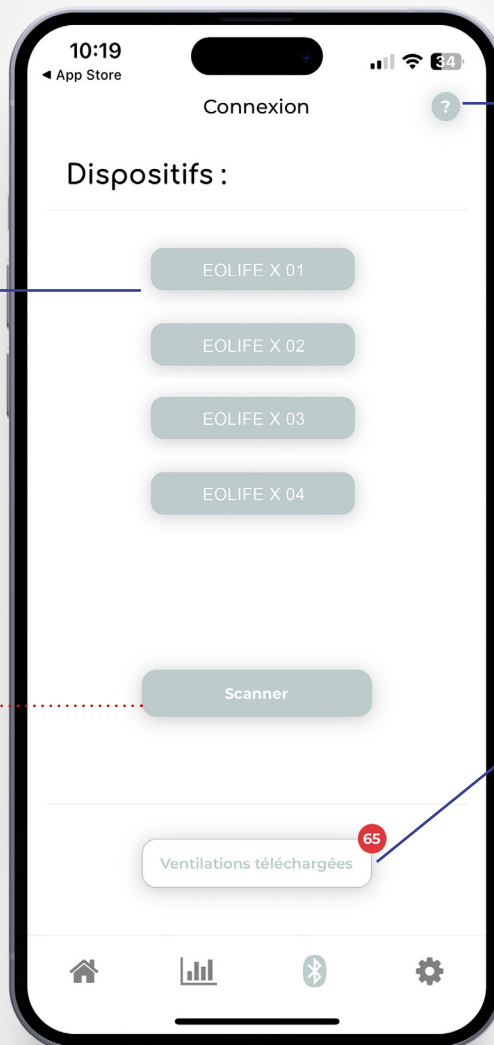

1

Sélectionner votre EOLife X.

Si votre appareil n'apparaît pas dans la liste, appuyez sur 'scanner'

Procédure de téléchargement (page 5)

2

Télécharger toutes les sessions de ventilation de votre EOLife X



## ATTENTION !

Une fois importées dans EOLife Connect, toutes les sessions seront effacées de votre EOLife X

# 02.PROCÉDURE DE TÉLÉCHARGEMENT

A



A

# 03. SESSIONS TÉLÉCHARGÉES

**1** Sélectionner une session. Vous pouvez sélectionner plusieurs sessions en maintenant l'appui.

Filtrer la liste

**2** Attribuer la session à un utilisateur (page 7)

Désactiver la sélection multiple

Supprimer toutes les sessions (actives et non actives)

Supprimer la session (seulement en sélection unique)

| NS dispositif | Date     | Heure | Durée    | Conforme |
|---------------|----------|-------|----------|----------|
| EOlife X0...  | 22/09/23 | 10:02 | 00:00:27 | 100%     |
| EOlife X0...  | 22/09/23 | 10:01 | 00:00:05 | 100%     |
| EOlife X0...  | 08/06/23 | 11:24 | 00:00:30 | 100%     |
| EOlife X0...  | 08/06/23 | 11:23 | 00:00:33 | 66%      |

|                |          |       |          |      |     |
|----------------|----------|-------|----------|------|-----|
| EOlife X000... | 15/06/23 | 15:50 | 00:00:26 | 100% | [X] |
| EOlife X000... | 15/06/23 | 15:48 | 00:00:32 | 0%   | [X] |
| EOlife X000... | 15/06/23 | 15:48 | 00:01:21 | 92%  | [X] |
| EOlife X000... | 15/06/23 | 15:47 | 00:00:40 | 0%   | [X] |
| EOlife X000... | 15/06/23 | 15:45 | 00:00:51 | 0%   | [X] |
| EOlife X000... | 15/06/23 | 15:41 | 00:03:58 | 100% | [X] |

# 04.ATTRIBUER UN UTILISATEUR

**A**

Sélectionner un utilisateur existant

10:21  
App Store

Assigner un utilisateur

Cette ventilation a été enregistrée le **22 septembre 2023** à **09:59**.  
C'était une ventilation en mode **continu** et **monitoré**, sur un **patient de taille moyen** et de **type adulte**.

+

Créer un utilisateur

Personne

Sélectionner un utilisateur existant

Home, Graphique, Bluetooth, Paramètres

Ou créer un nouvel utilisateur

10:21  
App Store

Créer un nouvel utilisateur

Prénom \*

Prénom

Nom \*

Nom

Age

Age

Genre

Genre

Profession

Profession

Etablissement

Etablissement

Années d'expériences


Années d'expériences

Sauvegarder

Home, Graphique, Bluetooth, Paramètres

# B

## 01. SESSIONS ATTRIBUÉES

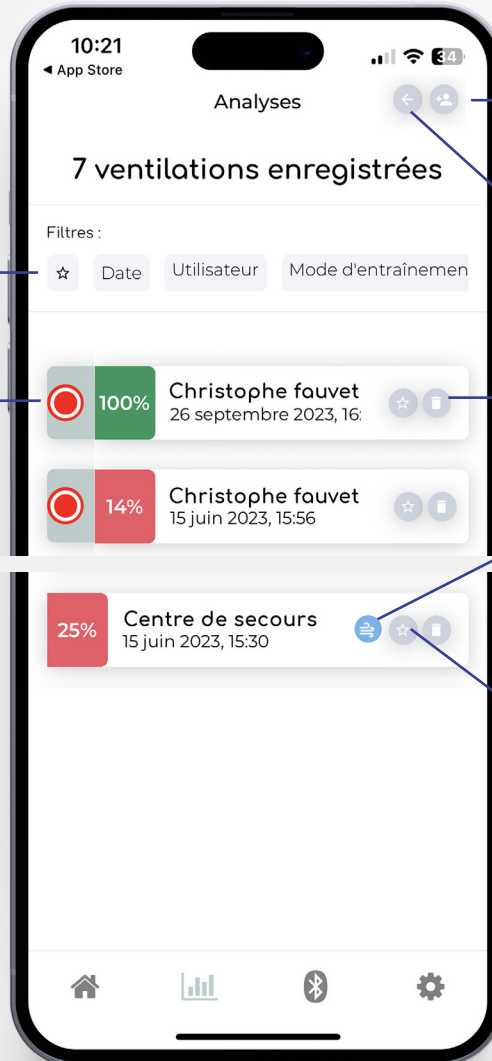

Filter la liste

Sélectionner une session pour plus de détails. (page 9)  
Vous pouvez sélectionner plusieurs sessions en maintenant l'appui.

Télécharger le fichier CSV de la (les) session(s) choisie(s)

Désactiver la sélection multiple

Supprimer la session

L'icône 🚨 indique que la session de ventilation a été réalisée avec l'option 'alarmes de fuites éteintes'. C'est pourquoi seul le Vi est affiché.

Ajouter la session aux Favoris



# 02.DÉTAILS DE SESSION


**B**

The image shows a smartphone screen displaying the 'Details of Session' for a user named Christophe Fauvet. The screen is annotated with callouts pointing to various elements:

- Top right:** Callouts for 'Télécharger le CSV de la session' (Download CSV of the session) and 'Assigner à un utilisateur' (Assign to a user).
- Header:** The name 'Christophe Fauvet' is displayed.
- Session Parameters:** A row of four cards: 'Type Adulte', 'Taille Moyen', 'Mode Continu', and 'Entrainement Monitoré'. A callout 'Paramètres de la session' points to this row.
- Score:** A green card showing 'SCORE 100%' with a circular arrow icon. A callout 'Analyse de la qualité de ventilation (page 11)' points to this card.
- Frequency:** A card showing 'FRÉQUENCE MOYENNE 12/min' with an hourglass icon. A callout 'Fréquences de ventilation (page 12)' points to this card.
- Volume:** A card showing 'VT MOYEN 447 mL' with a lung icon. A callout 'Détails des volumes (page 13)' points to this card.
- Duration:** A card showing 'DURÉE 00:00:33' with a clock icon. A callout 'Durée de la session' points to this card.
- Registrations:** A card showing 'NOMBRE D'ENREGISTREMENTS 2' with a microphone icon. A callout 'Voir la progression de l'élève (page 10)' points to this card.
- Bottom:** A blue button with the text 'Appuyez pour plus de détails' (Press for more details).

B


# 03. PROGRESSION DE L'ÉLÈVE

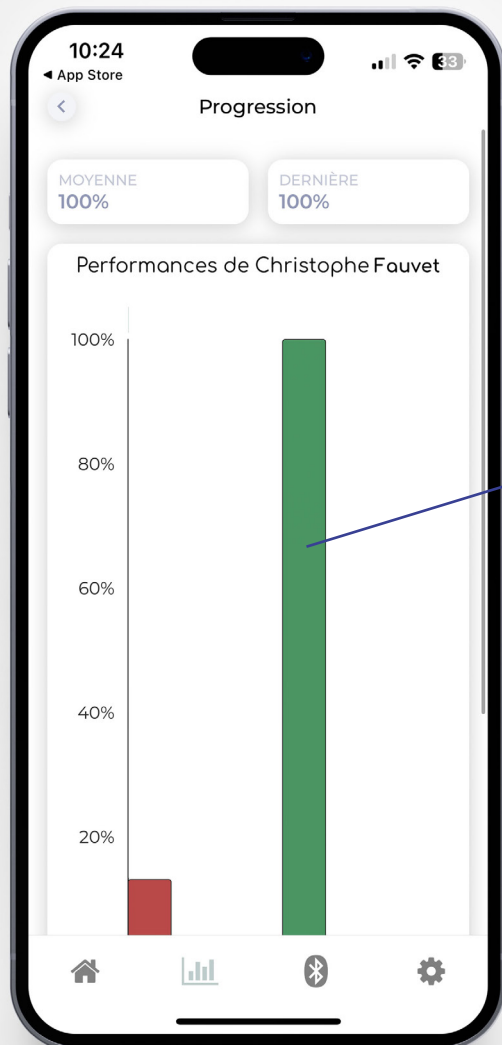

Appuyez sur précédent ou suivant pour vous déplacer dans le graphique


Appuyez sur la barre pour plus de détails

Visualisez la qualité de la ventilation pendant les sessions.

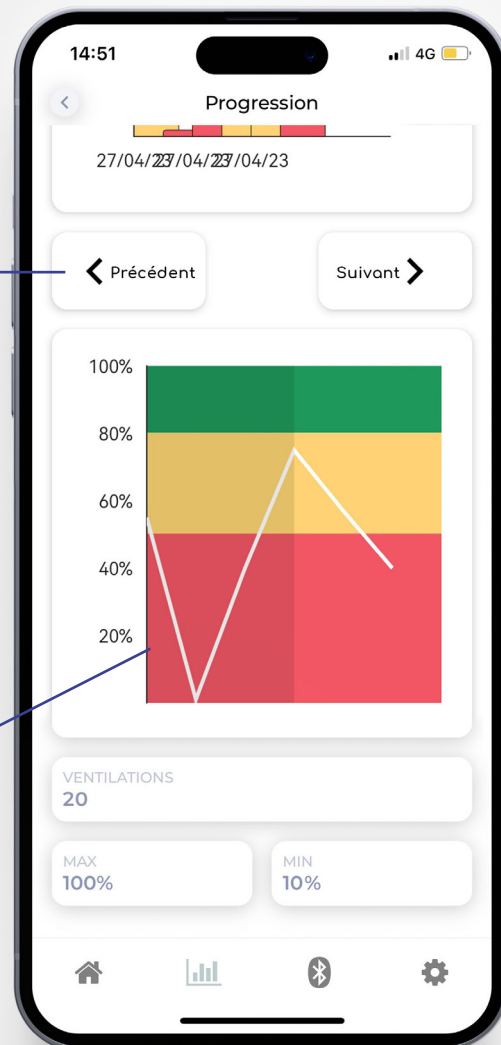


# 04.ANALYSE DE LA QUALITÉ DE VENTILATION

Appuyez pour voir le pourcentage de chaque alarme

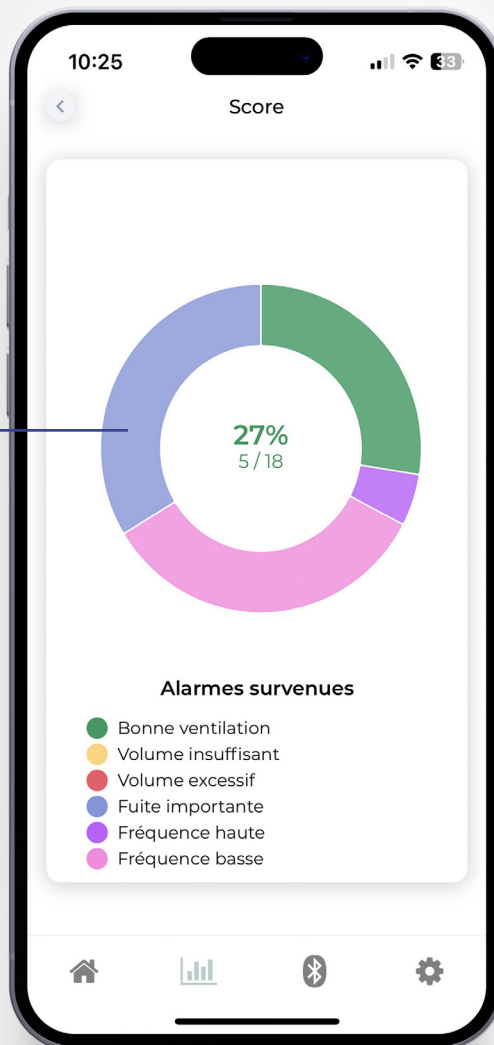


**B**

# 05.FRÉQUENCE DE VENTILATION

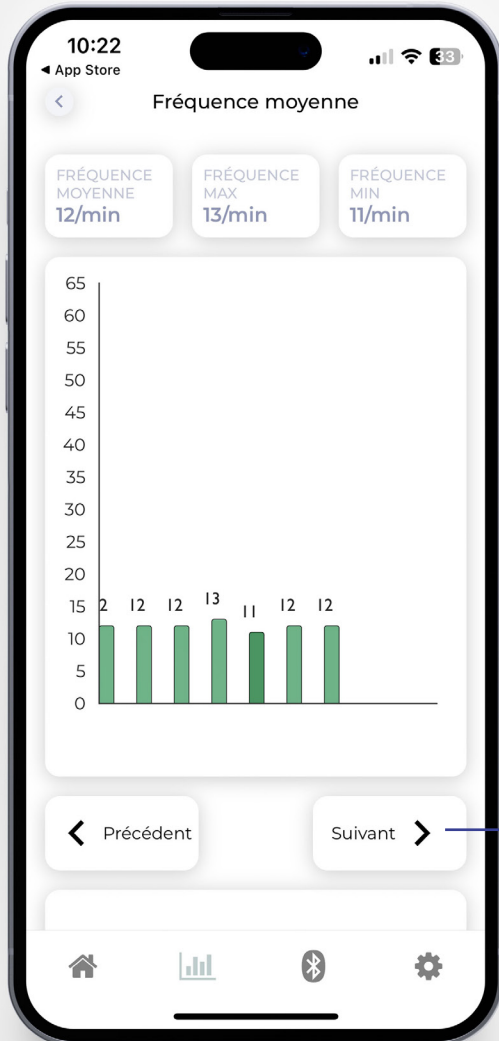

Appuyez sur précédent ou suivant pour vous déplacer dans le graphique

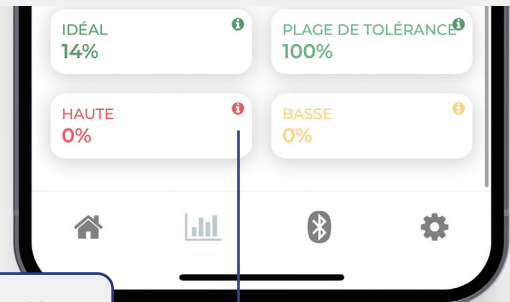


Appuyez sur (i) pour obtenir plus d'informations sur les résultats

**Information**

Une fréquence excessive supérieure à 15 ventilations par minute empêche l'obtention d'une pression intrathoracique négative pendant le relâchement du thorax, gênant le retour du sang veineux vers le cœur et diminuant ainsi l'efficacité hémodynamique de la RCP. Des études ont démontré que l'augmentation de la fréquence de ventilation de 12 à 30 respirations par minute réduisait les chances de survie de 70 %.

<https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/01.cir.0000126594.79136.61>

# 06.DÉTAILS DES VOLUMES

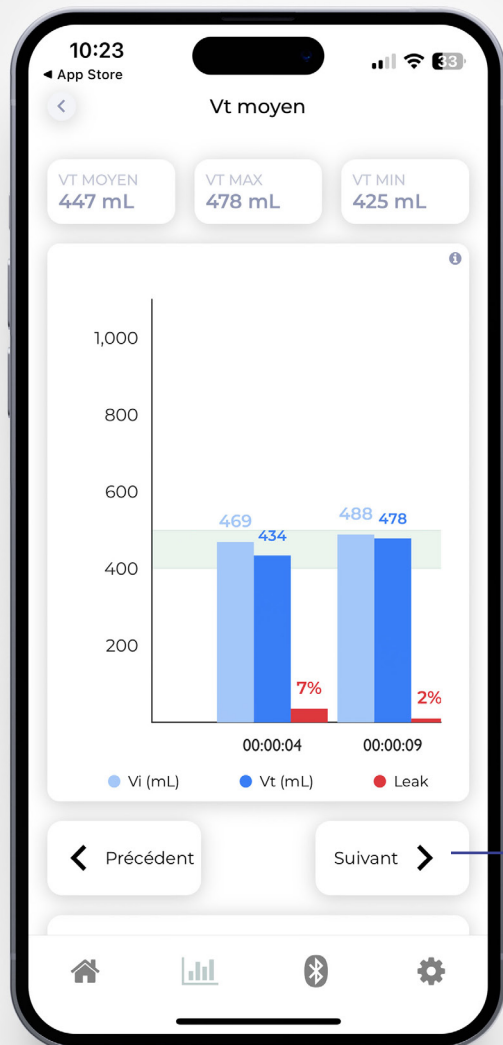**B**


Appuyez sur précédent ou suivant pour vous déplacer dans le graphique



C

# 01. RÉGLAGES


ajouter, modifier ou supprimer des utilisateurs

Politique de confidentialité, notions légales

Qui est Archeon Medical ?

Lisez la FAQ ou contactez nous par email pour toute question

Restorez la base de données de EOlife Connect (page 16)

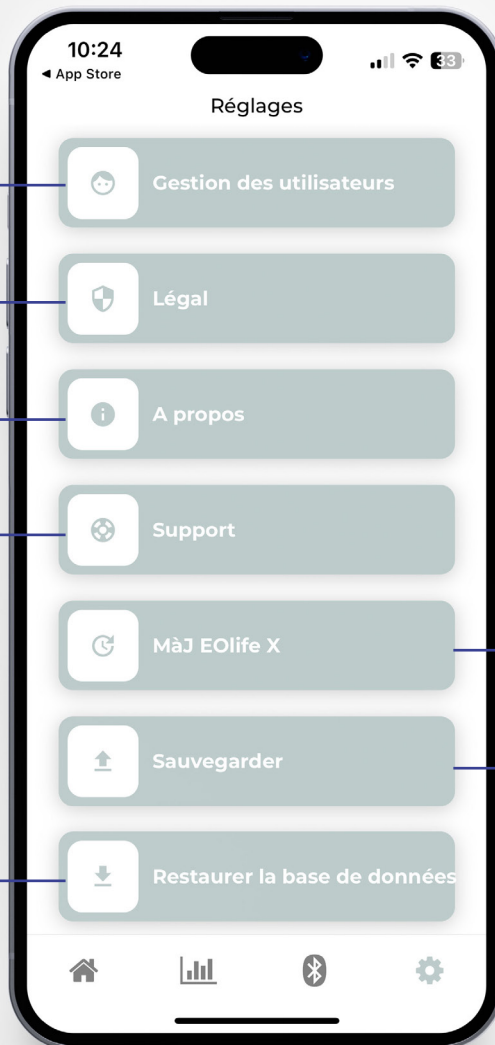


Mise à jour de votre EOlife X (seulement sur tablette)

Sauvegardez vos sessions sur votre mobile / tablette (page 15)

# 02.SAUEGARDE DES DONNÉES

C

Cette manipulation peut être faite avant de changer de matériel.

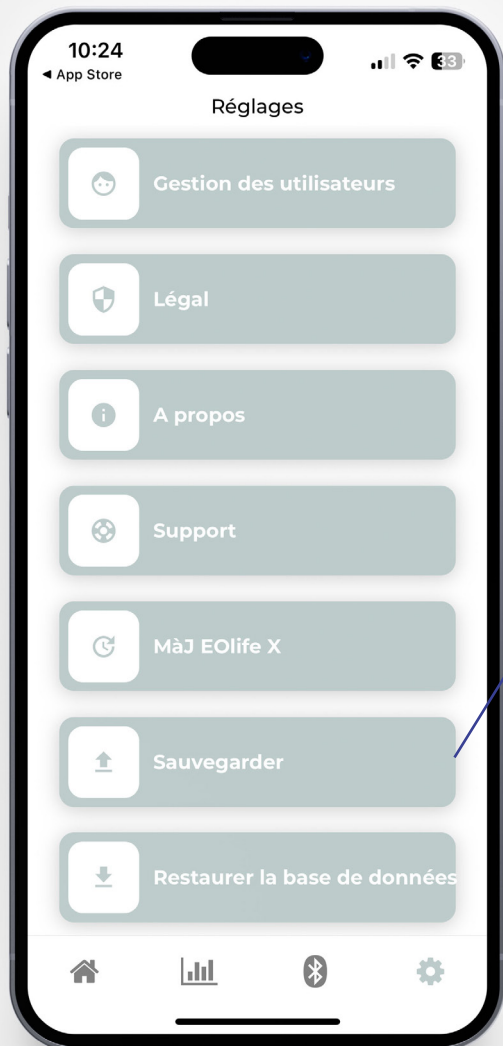


Appuyez sur 'Sauvegarder'  
et sur 'Oui'

Votre base de données EOlife  
Connect sera sauvegardée  
sur votre mobile/tablette  
dans un dossier spécifique,  
sous le nom:  
*eolife-connect-db-backup-{année}-  
{mois}-{jour}-{heure}.json*



C

# 03.RESTAURER LA BASE DE DONNÉES

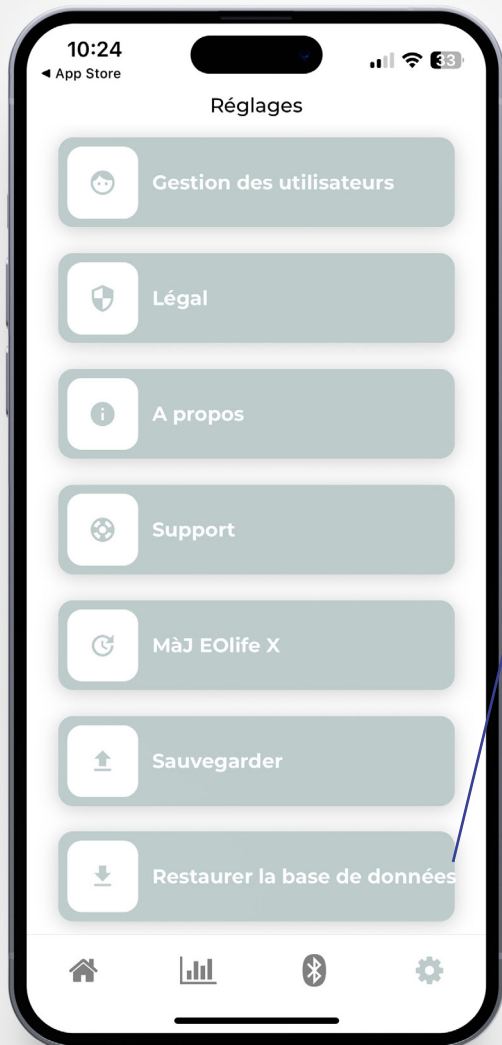

Appuyez sur 'Restaurer la base de données' et sur 'Oui'. Sélectionnez un fichier 'json' sur votre mobile/tablette.



## ATTENTION !

Votre base de données EOlife Connect sera écrasée par les données importées. Assurez-vous de réaliser une sauvegarde avant de restaurer la base de données.





---

Copyright © 2023 Archeon Medical - Tous droits réservés

Photos et copies d'écran : Archeon Medical.

Version : 01 FR - Novembre 2023

Archeon Medical - 2 chemin des aiguillettes - 25000 Besançon (FRANCE) - Tel +33 (0)3 81 66 23 80 - [www.archeon-medical.com](http://www.archeon-medical.com)

R.C.S. Besancon 835 009 465 - Document distribué au format électronique.